

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO
129 An Bình – Phường 6 – Quận 5 – TP.Hồ Chí Minh


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AROMA FINE PLUS NORMAL SET/FAST SET

I/ Mục đích sử dụng/chỉ định

Dựa trên các kiến thức mở rộng về vật liệu alginate của GC, AROMA FINE PLUS được sáng tạo nhằm giúp cho người dùng có thể lấy dấu sau cùng chuẩn xác nhất với theo tác trộn dễ dàng và nhanh chóng


II/ Cách sử dụng

Bước 1: Chuẩn bị bột và nước theo đúng tỉ lệ

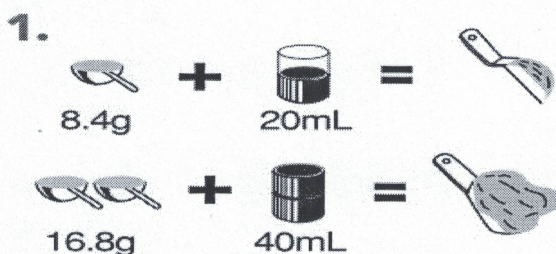


Measurement guidelines

Bước 2: Trộn đều hỗn hợp trong vòng 20-30 giây

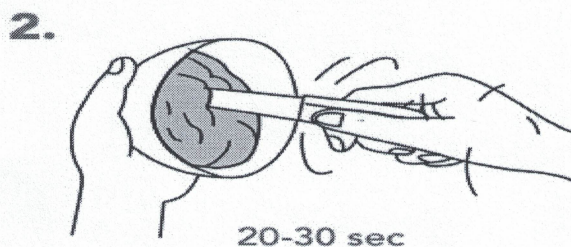

Spatulate vigorously


Bước 3: Đổ đều hỗn hợp vào khay lấy dấu và đặt vào miệng bệnh nhân tại vị trí cần lấy dấu và dùng ngón tay ấn khay sao cho đúng kỹ thuật để đạt hiệu quả tối ưu đến khi vật liệu cứng

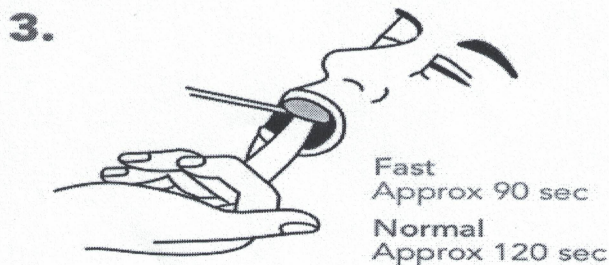

Hold tray in the mouth. Refreshing spearmint smell for patient comfort

Bước 4: Sau khi lấy khay dấu ra khỏi miệng bệnh nhân, đưa khay rửa dưới vòi nước sạch và lau khô


4.

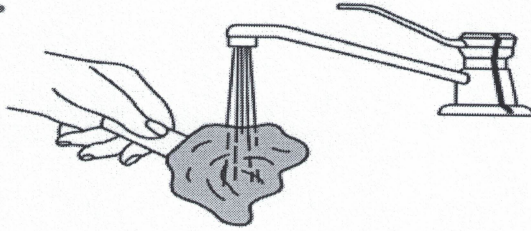

Rinse the impression under running water, and remove excess water

Bước 5: Sau khi thu được dấu, dấu nên được gửi càng sớm càng tốt đến phòng chế tạo răng giả để thực hiện các bước tiếp theo tránh làm biến dạng dấu đã thu được


5.

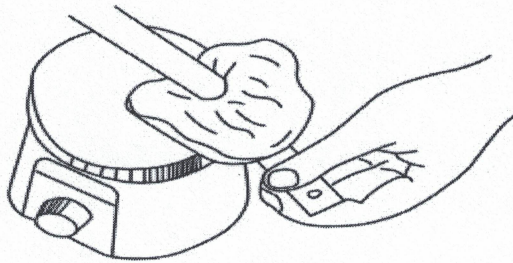

Alginate impression should be poured as soon as possible to avoid distortion.

Bước 6: Nếu dấu chưa được sử dụng ngay, hãy bảo quản dấu trong khăn giấy ẩm và lưu trữ trong 1 túi nhựa kín

6.

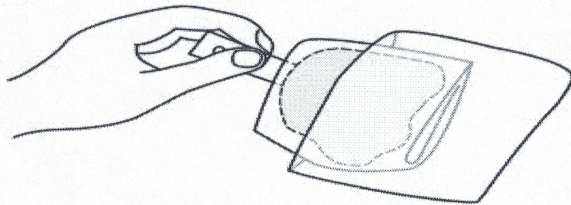

If cast cannot be poured immediately, wrap the impression in a wet paper towel and store in a tightly sealed plastic bag.



III/ Cảnh báo

- Khi trộn phải cẩn thận để tránh trộn lẫn hoặc tiếp xúc với các vật liệu khác. Nó có thể kéo dài hoặc ảnh hưởng sự đông cứng của hỗn hợp.

- Không để rơi vật liệu vào miệng bệnh nhân. Sau khi lấy dấu xong phải yêu cầu bệnh nhân súc miệng lại bằng nước sạch.

IV/ Chống chỉ định

Trong một số ít trường hợp, vật liệu này có thể gây nhạy cảm ở một số người. Nếu như bất kỳ phản ứng nào như vậy xảy ra, hãy ngừng sử dụng sản phẩm và tham khảo ý kiến bác sĩ

V/ Bảo quản

- Sau khi lấy vật liệu ra khỏi túi, đóng miệng túi kỹ để tránh bị ẩm ướt hoặc bay hơi.

- Để vật liệu ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp hoặc nơi ẩm thấp làm hư vật liệu