



CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO  
129 An Bình – Phường 6 – Quận 5 – TP.Hồ Chí Minh

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CAVEX CA37

### I/ Mục đích sử dụng/chỉ định

Vật liệu lấy dấu alginat Cavex CA37 là một loại bột, có chứa alginat, canxi sunfat, natripyrophotphat, kết hợp với chất độn tro, chất ổn định, chất tạo màu và hương liệu.

Vật liệu được sử dụng bởi người dùng chuyên nghiệp (nha sĩ và/hoặc trợ lý nha khoa), khi trộn vật liệu với nước, tạo thành hỗn hợp bột nhão nhằm mục đích lấy dấu răng làm cơ sở cho kỹ thuật đúc thạch cao

### II/ Cách sử dụng

#### Bước 1: Chuẩn bị vật liệu

- Khuấy bột cho thật mịn
- Lấy bột ra khỏi hộp bằng muỗng chuyên dụng với trọng lượng theo yêu cầu
- Trộn nước (ở nhiệt độ phòng) và bột trong cốc trộn.
  - \* để lấy dấu một phần : trộn 1 muỗng bột + 1/3 cốc nước
  - \* để lấy dấu toàn phần: trộn 2 muỗng bột + 2/3 cốc nước
  - \* để lấy dấu khô lớn: trộn 3 muỗng bột + cốc nước đầy

Lưu ý: Tỷ lệ trộn lý tưởng: 21.2 g = 3 muỗng bột: 46 ml = 1 cốc nước đầy

(Bạn có thể làm hỗn hợp loãng hơn hoặc đặc hơn bằng cách thêm nhiều hoặc ít nước tương ứng)

#### Bước 2: Trộn hỗn hợp

- Trộn cả hai thành phần với nhau một cách cẩn thận và kỹ lưỡng trong 30 giây cho đến khi mịn và thu được hỗn hợp đồng nhất.
- Đổ đầy khay lấy dấu ngay lập tức và dùng dụng cụ vuốt cho phẳng.
- Đảm bảo rằng bệnh nhân đã súc miệng bằng nước ấm trong thời gian đó.

#### Bước 3: Lấy dấu

- Trong vòng 1 phút 30 giây (Cài đặt bình thường) / 1 phút (Cài đặt nhanh) sau khi trộn, đưa khay lấy dấu vào miệng bệnh nhân nơi cần lấy dấu 1 cách nhẹ nhàng
- Để khay lấy dấu cố định trong miệng trong 1 phút 30 giây (Cài đặt thông thường) / 1 phút (Cài đặt nhanh).
- Lấy khay ra khỏi miệng bệnh nhân và thu được dấu

- Rửa sạch khay dầu dưới vòi nước lạnh để loại bỏ nước bọt và cặn bẩn.
- Loại bỏ nước dư thừa, nhưng để lại bề mặt ẩm. Không bao giờ thổi khô!

#### **Bước 4: Làm mỏm hình thạch cao**

- Ngay sau khi rửa sạch dầu thu được, thực hiện đổ khuôn thạch cao và trát lần thứ hai mỏm hình nếu muốn.
  - Nếu không thể đổ khuôn thạch cao ngay lập tức thì bảo quản dầu trong túi nhựa buộc kín để đạt được độ ẩm tương đối 100%. Điều này là cần thiết để có kết quả tối ưu sau này.
  - Lưu ý làm mẫu thạch cao trong vòng 48h sau khi lấy dầu.

#### **III/ Chống chỉ định**

Tránh sử dụng sản phẩm trong trường hợp đã biết bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào của vật liệu lấy dầu alginate

#### **IV/ Cảnh báo**

Không để rơi vật liệu vào miệng bệnh nhân. Sau khi lấy dầu xong phải xúc miệng lại bằng nước sạch



#### **V/ Tác dụng bất lợi có thể xảy ra**

Trong một số ít trường hợp, sản phẩm có thể gây nhạy cảm ở một số người. Nếu có những phản ứng như vậy xảy ra, hãy ngừng sử dụng sản phẩm và tham khảo ý kiến bác sĩ

#### **VI/ Bảo quản**

- Sau khi lấy vật liệu ra khỏi túi, đóng miệng túi kỹ để tránh bị ẩm ướt hoặc bay hơi.
- Để vật liệu ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp hoặc nơi ẩm thấp làm hư vật liệu