



**CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO**  
129 An Bình – Phường 6 – Quận 5 – TP.Hồ Chí Minh

## **HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ARTICULATING PAPER**

### **I/ Mục đích sử dụng/chỉ định**

ARTICALATING PAPER là loại giấy cắn có màu xanh và đỏ, được sử dụng để ghi dấu khớp cắn của các răng tự nhiên, răng giả và các loại phục hồi khác

### **II/ Cách sử dụng**

**Bước 1:** Chuẩn bị vị trí cần lấy dấu khớp cắn theo đúng kỹ thuật

**Bước 2:** Mở hộp lấy từng tờ giấy ARTICALATING PAPER

**Bước 3:** Đặt giấy vào vị trí cần lấy dấu khớp cắn trong miệng bệnh nhân

**Bước 4:** Yêu cầu bệnh nhân cắn nhẹ cho tới khi thu được dấu theo yêu cầu và thực hiện các kỹ thuật tiếp theo

### **III/ Cảnh báo**

Sản phẩm chỉ sử dụng bởi nha sỹ và các kỹ thuật viên sau khi được huấn luyện bởi các chuyên gia nhà sản xuất hay các đại lý được nhà sản xuất ủy quyền.

### **IV/ Chống chỉ định**

Trong một số ít trường hợp, vật liệu này có thể gây nhạy cảm ở một số người. Nếu như bất kỳ phản ứng nào như vậy xảy ra, hãy ngừng sử dụng sản phẩm và tham khảo ý kiến bác sỹ

### **V/ Bảo quản**

- Sau khi lấy vật liệu ra khỏi hộp, đóng kín miệng hộp để tránh bị ẩm ướt làm ảnh hưởng tới chất lượng vật liệu

- Để vật liệu ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp hoặc nơi ẩm thấp làm hư vật liệu