



CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO
129 An Bình – Phường 6 – Quận 5 – TP.Hồ Chí Minh

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PASTE PAK DISPENSER

I/ Mục đích sử dụng/chỉ định

PASTE PAK DISPENSER là dụng cụ phân phối vật liệu gắn dạng ống (dùng trong nha khoa)

II/ Cách sử dụng

Bước 1: Chuẩn bị vị trí cần phục hình theo đúng kỹ thuật

Bước 2: Mở hộp lấy dụng cụ phân phối

Bước 3: Lắp ống vật liệu phù hợp vào dụng cụ theo đúng kỹ thuật được chỉ dẫn từ nhà sản xuất

Bước 4: Nhấn dụng cụ để phân phối vật liệu ra khỏi ống sao cho vật liệu 2 bên ống đi ra đồng đều lên bàn trộn và thực hiện các quy trình phục hình tiếp theo

III/ Cảnh báo

Trong quá trình lắp dụng cụ nếu thao tác không đúng kỹ thuật có thể làm hỏng dụng cụ hoặc ống vật liệu.

IV/ Bảo quản

Tránh để dụng cụ tiếp xúc với các hóa chất vì có thể gây hư hỏng, gỉ sét dụng cụ.